



# DROGTEST Multipanel

- snabbtest för spårning av drogpreparat i urin

**Multi-panel**



- Precision > 99%
- Styckeförpackade
- Svar på 5 minuter
- Snabbt & enkelt med "doppa och lästest"
- Miljövänligt
- Skräddarsydda tester



Multipanelen kan fås med kombinationer av 2-12 av nedanstående tester. Kontakta oss gärna för mer information

Snabbtester	Cut off ng/ml
Amfetamin (AMP-300) (AMP-500) (AMP-1000)	300 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml
Barbiturat (BAR-300)	300 ng/ml
Bensodiazepin (BZD-100) (BZD-200) (BZD-300)	100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml
Buprenorfin/Subutex (BUP-10)	10 ng/ml
EDDP (EDDP-100)	100 ng/ml
Ecstasy (MDMA-500) (MDMA-1000)	500 ng/ml, 1000 ng/ml
Fencyklidin (PCP-25)	25 ng/ml
Fentanyl (FYL-10)	10 ng/ml
Kokain (COC-100) (COC-200) (COC-300)	100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml
Kofinin (COT-200) (COT-600)	200 ng/ml, 600 ng/ml
Ketamin (KET-1000)	1000 ng/ml
Marijuana (THC-25) (THC-50) (THC-150) (THC-200)	25 ng/ml, 50 ng/ml, 150 ng/ml, 200 ng/ml
Metadon (MTD-300)	300 ng/ml
Metaclon (MQL-300)	300 ng/ml
Methylendioxyamfetamin (MDA-500)	500 ng/ml
Metamfetamin (MET-300) (MET-500) (MET-1000)	300 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml
Opiater (OPI-100) (OPI-200) (OPI-300) (OPI-2000)	100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml, 2000 ng/ml
Oxykodon (OXY-100)	100 ng/ml
Propoxyfen (PPX-300)	300 ng/ml
Tricykliska Antidepressiva (TCA-1000)	1000 ng/ml
Tramadol (TML-100)	100 ng/ml



Besöksadress: Danska Gränd 2, Älvsjö  
Postadress: Box 26, 125 21 Älvsjö  
Tel: 08-99 00 90, Fax: 08-99 20 40  
info@anl.se [www.anl.se](http://www.anl.se)



# TESTUTFÖRANDE av Drogtest Multipanel



- 1 Ta av locket och doppa multistickan i urinprovet med pilen pekandes mot provet. Doppa endast till pilarna (doppa ej ned plastkassetten).
- 2 Håll kvar stickan i urinprovet i 15 sekunder.

- 3 Avläsning sker vid 5 minuter. Obs! Tolka inte resultatet efter 15 minuter!

## AVLÄSNING AV TEST

Multipanelen kan kombinera 2-12 individuella drogteststickor i ett test. Alla stickor fungerar efter samma princip och har en kontrollinje som alltid skall framträda i höjd med (C) markeringen, (denna linje visar att testet utförts på rätt sätt och att tillräcklig mängd urin tillsatts). Varje enskild sticka reagerar på olika droger och skall därför tolkas för sig. Om urinprovet ej innehåller någon av de i testet ingående drogerna kommer ytterligare en linje i höjd med (T) markeringen att framträda.

Vid eventuella fel eller frågor:  
Ring: 08-99 00 90, eller fax:  
08-99 20 40.

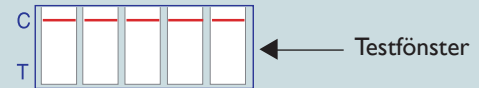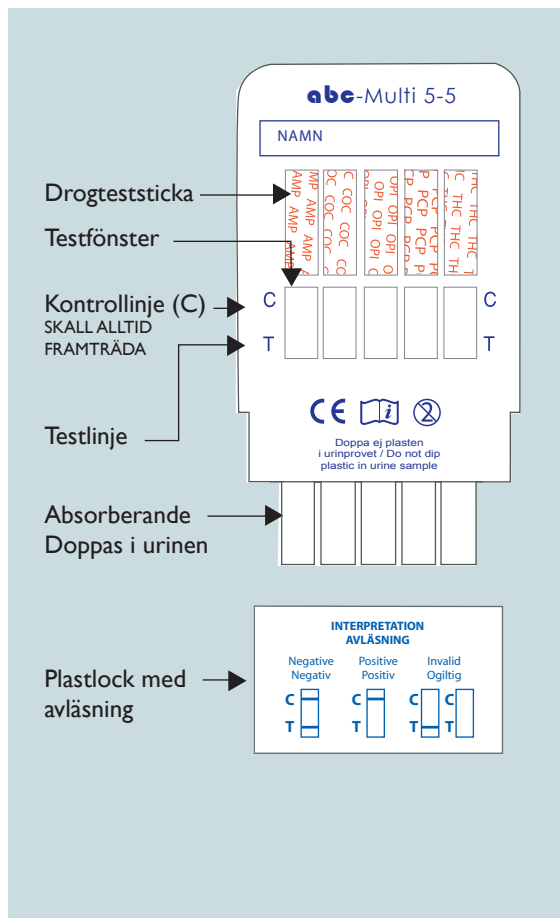


### POSITIV

Ett streck i kontrollinjen (C). Om ett urinprov innehåller någon av de i testet ingående drogerna, i detta exempel MTD, så framträder inget streck i höjd med (T) markeringen.



### NEGATIV

Två streck i både kontrollinjen (C) och testlinjen (T). När urinprovet ej innehåller någon av de i testet ingående drogerna så kommer förutom kontrollinjen, i höjd med (C) markeringen, också en linje i höjd med (T) markeringen att framträda.

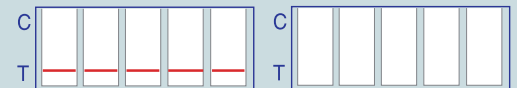

### OGILTIG

Inga streck eller enbart streck i testlinjen (T). Om det ej framträder ett streck i höjd med (C) markeringen är testet att betrakta som ogiltigt.



Snabbtest för spårning av drogpreparat i urin.

Snabbtester	Cut off ng/ml
Amfetamin (AMP-300) (AMP-500) (AMP-1000)	300 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml
Barbiturat (BAR-300)	300 ng/ml
Bensodiazepin (BZD-100) (BZD-200) (BZD-300)	100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml
Buprenorfin/Subutex (BUP-10)	10 ng/ml
EDDP (EDDP-100)	100 ng/ml
Ecstasy (MDMA-500) (MDMA-1000)	500 ng/ml, 1000 ng/ml
Fencyklidin (PCP-25)	25 ng/ml
Fentanyl (FYL-10)	10 ng/ml
Kokain (COC-100) (COC-200) (COC-300)	100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml
Kotinin (COT-200) (COT-600)	200 ng/ml, 600 ng/ml
Ketamin (KET-1000)	1000 ng/ml

Snabbtester	Cut off ng/ml
Marijuana (THC-25) (THC-50) (THC-150) (THC-200)	25 ng/ml, 50 ng/ml, 150 ng/ml, 200 ng/ml
Metadon (MTD-300)	300 ng/ml
Metaclon (MQL-300)	300 ng/ml
Metylendioxymfetamin (MDA-500)	500 ng/ml
Metamfetamin (MET-300) (MET-500) (MET-1000)	300 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml
Opiater (OPI-100) (OPI-200) (OPI-300) (OPI-2000)	100 ng/ml, 200 ng/ml, 300 ng/ml, 2000 ng/ml
Oxykodon (OXY-100)	100 ng/ml
Propoxyfen (PPX-300)	300 ng/ml
Tricykliska Antidepressiva (TCA-1000)	1000 ng/ml
Tramadol (TML-100)	100 ng/ml