



Graviditetstest



Finns både som singel- och rörförpackning

Analyz hCG Strip

- Säkert - mer än 99 %
- Snabbt resultat med "Doppa och läs-test"
- Miljövänlig strip
- Känslighet: 20 IU/l
- 25 tester/förpackning med singelpackade
- 25 tester/förpackning i rör





Analyz hCG Strip

TESTUTFÖRANDE av **Analyz** hCG Strip Graviditetstest

Analyz hCG Strip är ett graviditetstest med känsligheten 20 IU/l, vilket innebär att det kan användas redan 1-2 dagar efter utebliven menstruation. Säkrast resultat erhålles med morgonurin då koncentrationen av hCG är som störst. Urinen samlas i en ren glas- eller plastkopp.

1

Stickan doppas i urinen och låtes stå, eller tas upp efter 15 sekunder och lägges plant. OBS! Låt ej urinen nå över linjen märkt "MAX".

2

Testet avläses **efter 3 minuter**. Ett positivt svar kan normalt avläsas efter 30-40 sekunder då testlinjen ligger före kontrollinjen på membranet. **OBS! Läs ej efter 10 minuter!**

AVLÄSNING AV TEST

3

Strecken kan ha olika intensitet beroende på mängden hCG i urinen. Om inte något streck framträder kan resultatet ej tolkas eftersom testet antingen är för gammalt eller utsatts för felaktig behandling.

Vid eventuella fel eller frågor:
Ring: 08-99 00 90, eller
fax: 08-99 20 40.

